

NOUVEAUTES VERSION 2024

1/ MODE SIMPLIFIE

Avec le mode simplifié, utilisez l'essentiel du VoxiVision.

La navigation se fait uniquement à l'aide des 3 boutons de la barre de navigation. Et le bouton de droite, facilement identifiable, permet de passer rapidement d'une fonction à une autre.

Accès aux fonctions principales :

- **Machine à lire** : A utiliser sur le support ou tenu en main. En lecture automatique (sur le support), si reprise en main du VoxiVision, la lecture se poursuit et le texte s'affiche sur l'écran
- **Lecteur multi-fonctions** : Sur un même écran, permet de lire à la fois des codes-barres, étiquettes et billets (avec possibilité de personnalisation des codes-barres)
- **Loupe électronique** (non activée par défaut) : Zoom x20, filtres, gel de l'image
- Accès rapide aux paramètres

2/ LECTURE TABLEAU

En plus des colonnes, le VoxiVision peut maintenant lire des tableaux : ligne par ligne et non plus avec détection automatique des colonnes (mode par défaut).

Très pratique pour lire des relevés bancaires ou des factures simples.

- Non activée par défaut (à activer dans les paramètres)
- Disponible dans la Machine à lire (mode normal et simplifié)

3/ ECRITURE MANUSCRITE

VoxiVision utilise un nouveau moteur de reconnaissance de texte encore plus performant que le précédent : résultats plus qualitatifs, même avec des écritures difficiles à lire.

- Nécessite d'être connecté à Internet
- Disponible en mode normal et simplifié

4/ LECTEUR USB

VoxiVision ouvre de nouvelles possibilités et permet maintenant de brancher une clé USB.

- Sauvegarde texte et image vers clé USB
- Lecture fichiers Texte (.docx, Open Office, .pdf et .txt) et images (.jpg, .png, .gif)
- Lecteur PDF : Lecteur au format brut, affichage du format d'origine, navigation page par page

5/ DIFFUSION SUR **ECRAN EXTERNE**

Pour plus de confort, les contenus du VoxiVision peuvent être diffusés sans-fil sur un grand écran.

- Machine à lire
- Galerie : Visionnez en grand les images de votre galerie ou de votre clé USB
- Lecture silencieuse : Pour ceux qui souhaitent lire, la lecture silencieuse désactive la synthèse vocale et permet de naviguer ligne par ligne pour lire à son rythme et avec des gros caractères. En cas de fatigue visuelle, possibilité de réactiver à tout moment la synthèse vocale.

TELECOMMANDE **ERGONOMIQUE**

Le VoxiVision inclut désormais une télécommande ergonomique et design en bois et métal, permettant d'activer la commande vocale quand le VoxiVision est posé sur le support.



- Ergonomique : Bonne prise en main, ne glisse pas, trou pour dragonne, accès face arrière pour changer la pile de la télécommande
- Permet de sortir le VoxiVision de veille quand il est sur son support

Vidéo de présentation

<https://youtu.be/68u82BuAbjg>

Voxiweb

02 85 52 41 88

contact@voxweb.com